

Le cas clinique de Anne-Laure

Ulcère de jambe veineux malléolaire de 3 ans



Profil patient

- Femme
- 30/40 ans
- Insuffisance veineuse**, diagnostiquée par échodoppler veineux



Caractéristiques de la plaie

- Ulcère de jambe veineux malléolaire interne
- Ancienne de 3 ans
- Peau périlésionnelle saine
- Exsudat modéré
- Lit de la plaie : bourgeonnement



Protocole de soins

- Dakin
- Compresse
- Plaie à l'air libre



- Lavage au gel moussant et à l'eau
- Détersion mécanique
- Hydratation des jambes

Précédent

Étiologique

Local

Complémentaire



Evolution de la plaie


J1



Changement tous les jours

UrgoStart Plus Border UrgoK2

J8

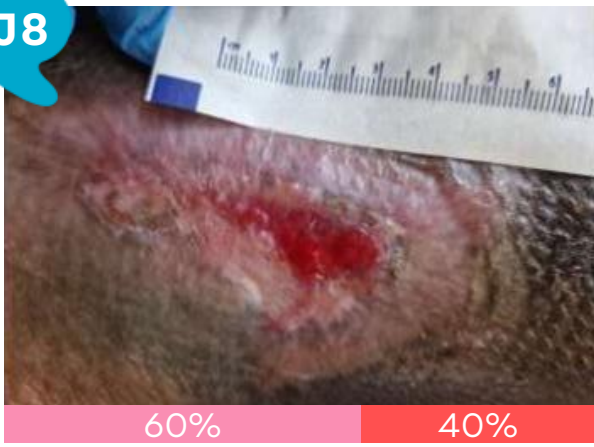

Changement tous les 2 jours

UrgoStart Plus Border UrgoK2

J21



Bourgeonnement Fibrine Epidermisation

UrgoStart Plus Border : Traitement pour réduire le temps de cicatrisation. Dispositifs Médicaux de classe IIb, (BSI CE 2797). Indications : Ulcères de jambe, plaies du pied diabétique, escarres, autres plaies à risque de cicatrisation de longue durée, plaies récurrentes, ou plaies à risque de retard de cicatrisation. Contre-indications: plaies cancéreuses, fistuleuses, nécrotiques, hémorragiques, plaies sur muqueuses, hypersensibilité connue à l'un des pansements avec matrice TLC ou TLC-NOSF, ou à la carboxyméthylcellulose (CMC). Renouvellement tous les 1 à 2 jours pendant la phase de détersion de la plaie, puis adapter la fréquence de renouvellement en fonction du volume des exsudats et de l'état clinique de la plaie. Intégralement remboursable LPPR (Sec. Soc. : 60% + Mutuelle : 40%) dans le traitement de l'ulcère de jambe veineux ou mixte à prédominance veineuse, en phase de bourgeonnement (traitement séquentiel), et dans l'ulcère du pied chez le patient diabétique d'origine neuro-ischémique (ischémie non critique), non infecté (critères d'infection IDSA/IWGDF), en phase de bourgeonnement (traitement séquentiel).

UrgoK2 / UrgoK2 Latex free : Systèmes de compression multitypes bi-bande à pression contrôlée. Dispositifs Médicaux de classe I, marqués CE. Indications : Traitement, chez l'adulte, de l'ulcère veineux de jambe et/ou des oedèmes du membre inférieur, pour lequel une compression forte est recommandée. Contre-Indications : Pathologie artérielle modérée ou sévère, avec notamment un Indice de Pression Systolique (IPS) récent <0.8; Patient souffrant de phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle), de phlébite septique; Oedème causé par une insuffisance cardiaque congestive; Pontage artériel extra-anatomique; Hypersensibilité connue à l'un des constituants - en particulier le latex pour URGO K2. Intégralement remboursables LPPR (Séc. Soc. 60% + Mutuelle 40%) dans le traitement de l'ulcère de jambe d'origine veineuse (IPS ≥0.8)

Avis CNEDIMTS disponible sur le site <https://www.has-sante.fr/>. Lire attentivement la notice avant utilisation.