

## Le cas clinique de Laurent

Plaie du pied diabétique bourgeonnante ancienne de 3 mois



### Profil patient

- Homme
- 50/60 ans
- Diabète de type 2



### Caractéristiques de la plaie

- Mal perforant plantaire en regard de la tête du 1er métatarse
- Plaie bourgeonnante
- Ancienne de 3 mois
- Exsudat modéré
- État de la peau péri lésionnelle : macérée et hyperkératosique



### Protocole de soins

Antibiotique local  
Bétadine  
Sparaplaie

Suggestion au patient  
d'une consultation  
spécialisée



Détersion mécanique

Refus de la décharge  
par le patient

Précédent

Étiologique

Local


Complémentaire



### Evolution de la plaie



Détersion mécanique de l'hyperkératose  
Changement **tous les 2 jours**

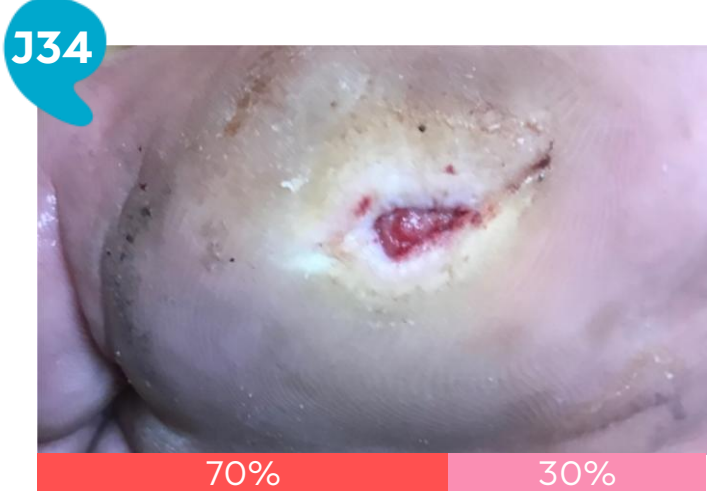

Changement **tous les 2 jours**



J57



Changement **tous les 2 jours**



■ Bourgeonnement ■ Fibrine ■ Epidermisation

**UrgoStart Plus Border** : Traitement pour réduire le temps de cicatrisation. Dispositifs Médicaux de classe IIb, (BSI CE 2797). Indications : Ulcères de jambe, plaies du pied diabétique, escarres, autres plaies à risque de cicatrisation de longue durée, plaies récurrentes, ou plaies à risque de retard de cicatrisation. Contre-indications: plaies cancéreuses, fistuleuses, nécrotiques, hémorragiques, plaies sur muqueuses, hypersensibilité connue à l'un des pansements avec matrice TLC ou TLC-NOSF, ou à la carboxyméthylcellulose (CMC). Renouvellement tous les 1 à 2 jours pendant la phase de détersion de la plaie, puis adapter la fréquence de renouvellement en fonction du volume des exsudats et de l'état clinique de la plaie. Intégralement remboursable LPPR (Sec. Soc. : 60% + Mutuelle : 40%) dans le traitement de l'ulcère de jambe veineux ou mixte à prédominance veineuse, en phase de bourgeonnement (traitement séquentiel), et dans l'ulcère du pied chez le patient diabétique d'origine neuro-ischémique (ischémie non critique), non infecté (critères d'infection IDSA/IWGDF), en phase de bourgeonnement (traitement séquentiel).

Avis CNEDIMTS disponible sur le site <https://www.has-sante.fr/>. Lire attentivement la notice avant utilisation.