


# GUIDE DE PRISE EN CHARGE DES PLAIES

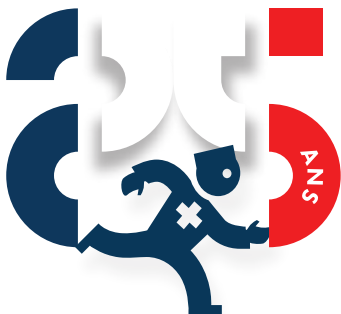

**D'INNOVATION AU SERVICE  
DES PATIENTS ET DE LA COLLECTIVITÉ**

Développé avec des  
infirmiers et IPA

**URGO**  
MEDICAL  
Time to try, time to live

## LES SAVOIR-FAIRE D'URGO MEDICAL

### • Savoir-faire textile



### • Savoir-faire pansement



Des technologies uniques



### • Savoir-faire Français



**CHEVIGNY**  
Pansements technologiques



**CHENÔVE**  
Siège historique  
R&D et transposition industrielle

**VEAUCHE**  
Textile médical et  
technologie de tissage

\*Hors UrgoK2 Latexfree

## NOS SOLUTIONS

### Pour vous, soignant<sup>2</sup> :



- Simplifier votre pratique
- Éviter les complications



### Pour votre patient<sup>2,3</sup> :









- Délais de cicatrisation réduits
- Meilleure qualité de vie








### Pour la collectivité<sup>4,5</sup> :

- Économies générées
- Réduction des déchets

## Nos solutions pansements

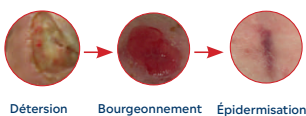Classe	Nom du pansement
Hydrocellulaires adhésifs / pansements à fibres	UrgoStart Plus Border 
Hydrocellulaires non-adhésifs / pansements à fibres	UrgoStart Plus Absorb 
	UrgoStart Plus Compresse 
Interfaces	UrgoTul 
	UrgoFit 
	UrgoStart Interface 
Mèches	UrgoClean Meche 
Pansements à l'argent	UrgoTul Ag / UrgoClean Ag 

## pour répondre à tous vos besoins

Indications	Étape de cicatrisation
Ulcères de jambe, plaies du pied diabétique, escarres	<p>Toutes les phases de cicatrisation</p>  <p>Détersion    Bourgeonnement    Épidermisation</p>
Brûlures, dermabrasions, plaies traumatiques, plaies post-opératoires, épidermolyse bulleuse	<p>Épidermisation</p> 
Ulcères de jambe, plaies du pied diabétique, escarres	 <p>Bourgeonnement    Épidermisation</p>
Plaies creusantes	<p>Détersion</p> 
Infection ou risque d'infection	<p>Infection</p> 

## Des technologies innovantes

### Technologie TLC



Une technologie  
unique et brevetée

La **Technologie Lipido-colloïde (TLC)** est une innovation exclusive, brevetée par les Laboratoires Urgo et développée pour favoriser la cicatrisation des plaies grâce au maintien du milieu humide. Il s'agit d'une matrice cicatrisante gélifiée, composée de particules hydrocolloïdes (CMC\*) et lipophiles.

### Technologie TLC NOSF



Urgo **Start plus**

Une gamme de  
pansements unique  
et brevetée

La **TLC-NOSF** est une **technologie** qui :

- Réduit le délai de cicatrisation<sup>1</sup>
- Présente une efficacité clinique démontrée<sup>1</sup>

\* Carboxy Méthyl cellulose

### Technologie à fibres



Ces fibres polyabsorbantes sont une technologie qui :

- **Piègent la fibrine<sup>2</sup>** comme un aimant
- **Détergent et maintiennent la plaie propre<sup>3</sup>**
- **Ont des propriétés hémostatiques<sup>4</sup>**, ce qui facilite l'arrêt des saignements mineurs




L'UNICITÉ Urgo **Start plus**



**DÉTERGE  
ABSORBE  
CICATRISE**


# **Pansements à fibres et Hydrocellulaires adhésifs**

**NON SUBSTITUABLE<sup>1</sup>**

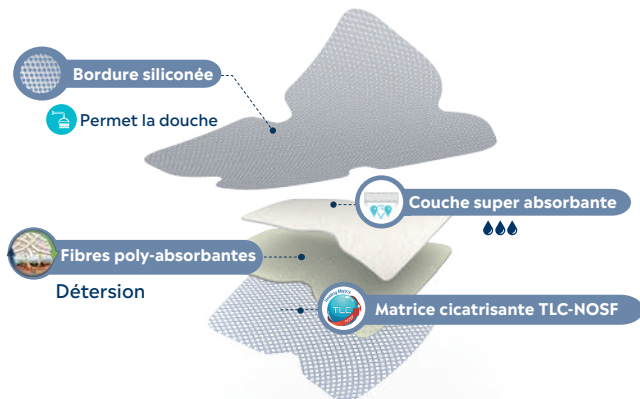**UrgoStart<sup>plus</sup>**  
Border


## Indications

- Tous les stades de la cicatrisation (dès la phase de déterSION jusqu'à cicatrisation).\*
- Patients présentant des plaies (ulcères de jambe, escarres, plaies du pied diabétique), quel que soit le niveau d'exsudat.

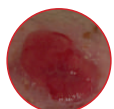
**DéterSION**

**Bourgeonnement**

**Épidermisation**

*\*sauf nécrose sèche*

## Bénéfices


**Délai et coût de cicatrisation réduits<sup>2</sup>**

**Absorption très forte**

**Confortable et conforme**

## Usage


**Non découpable**

**Permet la douche**

**Utilisable sous compression**

**Repositionnable**

**Coude**

**Sacrum**

**Tibia**

**Malléole**

**Orteils**

**Talon**

## Assortiments UrgoStart Plus Border



Taille	Code ville
8 x 8 cm	35468.900.399.7.5
10 x 12 cm	35468.900.425.6.2
13 x 15 cm	35468.900.425.2.4
17 x 20 cm	35468.900.425.5.5
20 x 20 cm Sacrum	35468.900.419.4.7

Par boîte de 16


# **Pansements à fibres et Hydrocellulaires non - adhésifs**

**NON SUBSTITUABLE<sup>1</sup>**

## NOUVEAUX FORMATS



**UrgoStart<sup>plus</sup>**  
Absorb

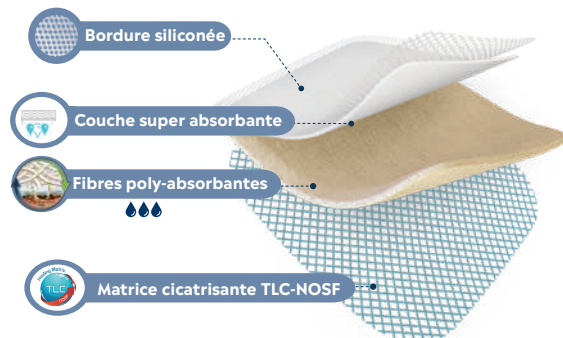


## Indications

- Tous les stades de la cicatrisation (dès la phase de déterision jusqu'à cicatrisation).\*
- Patients présentant des plaies exsudatives (ulcères de jambes, escarres, plaies du pied diabétique).



**Déterision**

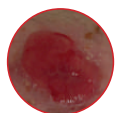

**Bourgeonnement**



**Épidermisation**

*\*sauf nécrose sèche*

## Bénéfices

**Finies les superpositions !**



**Confort patient**



**Facilité à prescrire**



**Gain de temps dans les soins**



**Économies pour le système de santé**

## Usage



**Non découpable**



**Utilisable sous compression**



**Respect de la peau périlésionnelle**

## Assortiments UrgoStart Plus Absorb

### NOUVEAUX FORMATS



Par boîte de 16

Taille	Code ville
6 x 6 cm	35468.900.472.0.8
10 x 10 cm	35468.900.472.1.5
13 x 12 cm	35468.900.472.2.2
15x 20 cm	35468.900.413.4.3




**NON SUBSTITUABLE<sup>1</sup>**

**UrgoStart<sup>plus</sup>**  
Compresses



Presque  
**2X<sup>plus</sup>**  
de fibres\*\*

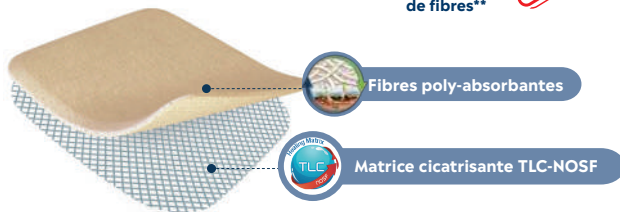


## Indications


- Tous les stades de la cicatrisation (dès la phase de détersion jusqu'à cicatrisation).\*
- Patients présentant des plaies (ulcères de jambe, escarres, plaies du pied diabétique), quel que soit le niveau d'exsudat.
- Particulièrement adapté aux patients présentant des plaies fibrineuses en phase de détersion et à tous types de localisations.



**Détersion**

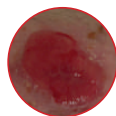

**Bourgeonnement**

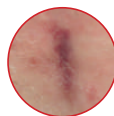

**Épidermisation**

\*sauf nécrose sèche

\*\*en comparaison à Urgostart Plus Absorb et Urgostart Plus Border

## Bénéfices



**Délai et coût de cicatrisation réduits<sup>2</sup>**



**Respect de la peau périlésionnelle**



**Déterge et maintient la plaie propre**

## Usage



**Découpable**



**Utilisable sous compression**



**Retrait monobloc**



Se référer à l'onglet "**Découpez**"

## Assortiments UrgoStart Plus Compresses



Taille	Code ville
6 x 6 cm	35468.900.401.9.3
13 x 12 cm	35468.900.402.8.5
15 x 20 cm	35468.900.402.6.1

# Interfaces

**NOUVEAUTÉ 2026**

NOUVEAUTÉ

NON SUBSTITUABLE<sup>1</sup>

Disponible à partir de janvier 2026

Urgo **Fit**



LA NOUVELLE INTERFACE  
SANS TRAME TEXTILE



CONSTITUÉ À 100%  
D'UNE MATRICE TLC

Particules hydrocolloïdes

Substances grasses  
(Vaseline, paraffine liquide)

## Indications

Plaies post-opératoires, brûlures, plaies traumatiques, Épidermolyse Bulleuse, greffe.



**Toutes plaies dans toutes les localisations.**

## Bénéfices

- Épouse toutes les localisations<sup>2</sup>
- Plus de praticité dans vos soins\*
- Une cicatrisation optimisée<sup>1,2</sup>

## Usages



**\*Ne colle pas aux gants**



**\*Découpable à la main**



**\*Reste en place pendant le soin**



**Ne pas étirer le pansement**

## Assortiments UrgoFit



**À PARTIR DE JANVIER 2026**


Taille	Code ville
12 x 12 cm	35468.900.408.3.4
12 x 40 cm	35468.900.408.5.8
15 x 22 cm	35468.900.408.7.2

Existe en 5x5 cm uniquement à l'hôpital

12x12 en boîte de 16, 12x40 et 15x22 en boîte de 10

NON SUBSTITUABLE<sup>1</sup>

# UrgoTul

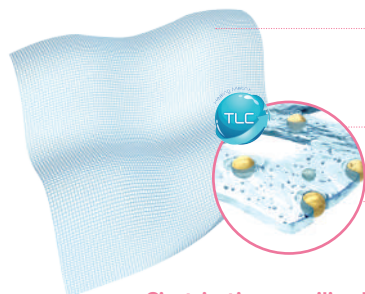

Trame de polyester  
souple enduite de TLC

**TLC = Technologie  
Lipido-Colloïde :**

Substances grasses



Particules  
hydrocolloïdes (CMC)

**Cicatrisation en milieu humide  
Gélification au contact des exsudats**



## Indications

- Brûlures.
- Dermabrasions.
- Plaies traumatiques.
- Plaies post-opératoires.
- Épidermolyse bulleuse.

**BRÛLURE<sup>1</sup>**



**PLAIE  
TRAUMATIQUE<sup>2</sup>**



**PLAIE  
POST-OPÉATOIRE<sup>3</sup>**



**ÉPIDERMOLYSE  
BULLEUSE<sup>4</sup>**



## Bénéfices

- Efficacité pro-cicatrisante<sup>5,6</sup>
- Retrait atraumatique et indolore<sup>6</sup>
- Usage facile pour le patient et le professionnel de santé

## Usage



**Découpable**



**N'arrache pas les bourgeons**



**Mettre un pansement secondaire**  
(compresse, bandage tubulaire, etc...)



**Méchable**

## Assortiments UrgoTul



10x12 en boîte de 16  
10x40 et 15x20 en boîte de 10

Taille	Code ville
10 x 12 cm	34010.971.728.3.5
10 x 40 cm	34010.776.095.5.9
15 x 20 cm	34010.755.472.4.2

NON SUBSTITUABLE<sup>1</sup>

**UrgoStart**  
Interface




Matrice cicatrisante TLC-NOSF

**Pansement TLC-NOSF  
unique et breveté**

## Indications

- Patients présentant des plaies (ulcères de jambe, escarres, plaies du pied diabétique), dès bourgeonnement jusqu'à épidermisation.
- Particulièrement adapté aux plaies creusantes.

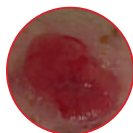

**Bourgeonnement**



**Épidermisation**

*\*sauf nécrose sèche*

## Bénéfices



**Délai et coût de cicatrisation réduits<sup>1,4</sup>**



**Conformable et adapté aux plaies profondes et cavitaires**

## Usage



**Découpable**



**Méchable**

## Assortiments UrgoTul




Par boîte de 16

Taille	Code ville
5 x 7 cm	35468.900.326.6.2
13 x 12 cm	35468.900.385.7.2
15 x 20 cm	35468.900.385.6.5

# Mèches

NON SUBSTITUABLE<sup>1</sup>

**UrgoClean**  
Meche

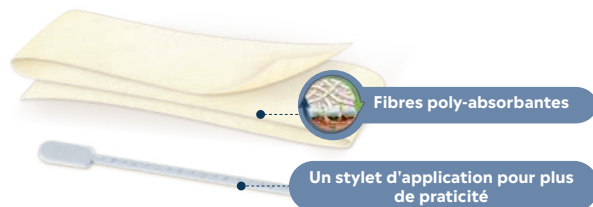

## Indications

Patients présentant des plaies cavitaires exsudatives et autres plaies creuses exsudatives qui ont besoin d'être comblées avec une mèche absorbante.

**Amputation chez un patient**



**Désunion du scarpa**



**Plaie cavitaire profonde**



## Bénéfices

**DRAINE** les débris fibrineux<sup>2</sup>

**DETERGE** la plaie<sup>2</sup>

**ABSORBE** les exsudats<sup>3</sup>

**PIÈGE** les bactéries<sup>4</sup>

**FAVORISE** l'hémostase de contact<sup>5</sup>


## Usage



**Découppable**



**Méchable**

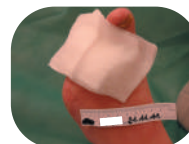

Pratique : fourni avec un stylet d'application pour faciliter l'insertion de la mèche.

## Assortiments UrgoClean Meche



Taille	Code ville
5 x 40 cm	34010.413.696.6.3

# Pansements à l'argent



NON SUBSTITUABLE<sup>1</sup>

UrgoTul Ag UrgoClean Ag



## Indications

Plaies à risques d'infection ou présentant des signes cliniques d'infection locale.

- Brûlures.
- Dermabrasions.
- Plaies traumatiques.
- Plaies post-opératoires.
- Ulcères de jambe.
- Escarres.

**BRÛLURE**



**MORSURE**



## Bénéfices

Les seules gammes à l'Argent  
100% remboursables en ville

Efficacité anti-bactérienne<sup>1</sup>

Efficacité bactéricide sur le biofilm<sup>2</sup>

UrgoClean Ag permet la détersion en continu<sup>3</sup>

## Usage

- Traitement en séquentiel sur 14 jours jusqu'à 1 mois (après réévaluation à J14)
- Non prescriptibles par les IDE

## Assortiments gamme Ag




Taille	Code ville
10 x 12 cm	34010.958.438.5.0
15 x 20 cm	34010.958.437.9.9



Taille	Code ville
6 x 10 cm	35468.900.000.0.5
13 x 12 cm	35468.900.000.2.9
15 x 20 cm	35468.900.000.1.2

# Compression

# LES RECOMMANDATIONS DE LA HAS<sup>1</sup>

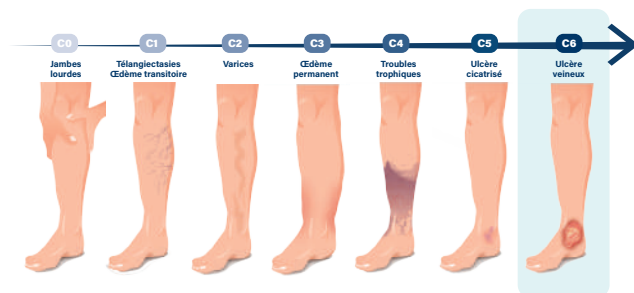


L'ulcère de jambe veineux est le stade ultime de l'insuffisance veineuse (stade C6).

**LA COMPRESSION, le traitement étiologique de référence des ulcères de jambe à prédominance veineuse<sup>2</sup>.**


## VEINE PATHOLOGIQUE

### Sans compression

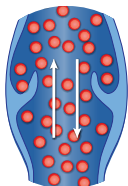

Les valves endommagées conduisent à un mauvais retour veineux et à une augmentation de la pression dans les veines de la jambe.

### Avec compression

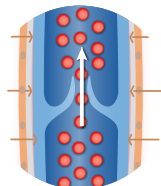

La pression appliquée par les bandes améliore le retour veineux et aide les valves à agir correctement.

## L'INSUFFISANCE VEINEUSE

C6

Ulcère ouvert (Stade C6)

**BANDAGES MULTITYPE EN 1<sup>ÈRE</sup> INTENTION JUSQU'À CICATRISATION COMPLÈTE**

*ou bandes sèches inélastiques ou à allongement court ou bandes enduites ou bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) > 36 mmHg*

C5

Ulcère cicatrisé (Stade C5)

bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 20 à 36 ou > 36 mmHg ou bandes sèches à allongement court

C4

Lipodermatosclérose, hypodermite veineuse, atrophie blanche (Stade C4b)

Pigmentation, eczéma veineux (Stade C4a)

C3

Œdème chronique (Stade C3)

C2

Après sclérothérapie ou chirurgie des varices

Varices 3 mm (Stade C2)

Signes cliniques

C1

Télangiectasies Œdème transitoire (Stade C1)


Symptômes

C0

Jambes lourdes (Stade C0)

**BANDAGES MULTITYPE** = au moins 2 bandes de compression différentes sont superposées  
Selon la terminologie HAS

**Bande à allongement COURT**  
(inélastique)

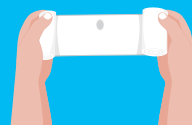

fournit des pressions élevées pendant la marche et faibles au repos.

**Bande à allongement LONG**  
(élastique)



fournit une pression soutenue.


NON SUBSTITUABLE<sup>1</sup>

# UrgoK2



## Apporte la rigidité et contribue au confort

Bande de compression à allongement court (~80 %\* de la pression)

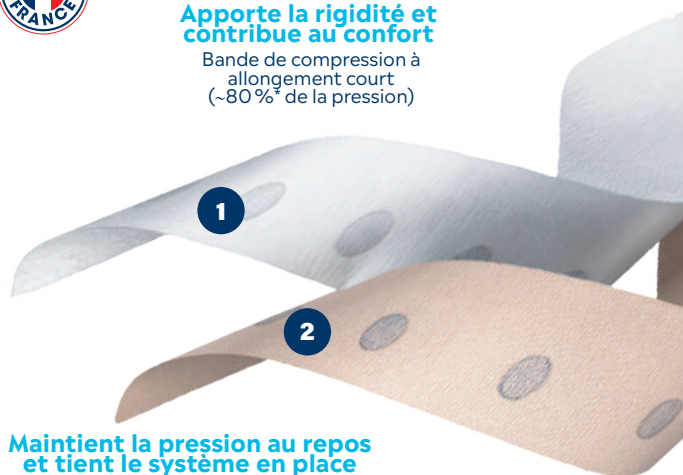

## Maintient la pression au repos et tient le système en place

Bande de compression à allongement long (~20 %\* de la pression)

## Indications

Traitement, chez l'adulte, de l'ulcère veineux de jambe et/ou des œdèmes du membre inférieur, pour lequel une compression forte est recommandée.

\* Ces informations sont fournies à titre purement indicatif.

\*\*Hors UrgoK2 Latex free.

## Bénéfices

- » CONFORME AUX RECOMMANDATIONS DE LA HAS en 1<sup>ère</sup> intention et jusqu'à cicatrisation complète.<sup>1</sup>
- » ASSURE UNE PRESSION CONTINUE 24H/24, quelle que soit la mobilité du patient.<sup>3,4</sup>
- » Améliore les délais de cicatrisation, **22 JOURS DE CICATRISATION GAGNÉS**.<sup>5</sup>
- » BIEN TOLÉRÉ par les patients, de jour comme de nuit.<sup>6</sup>

## Assortiments UrgoK2

**100 % remboursables\***

Taille de la cheville	Largeur de bandes	Code ACL
18-25 cm	10 cm	35468.900.472.4.6
25-32 cm	10 cm	35468.900.378.0.3

UrgoK2

UrgoK2 existe également en largeur 8 et 12 cm

UrgoK2  
Latex free

18-25 cm	10 cm	35468.900.294.9.5
25-32 cm	10 cm	35468.900.294.8.8

Pour les DROM-COM, seul **URGOK2 Latex Free** est disponible.

\*Intégralement remboursables LPPR (Séc. Soc. 60% + Mutuelle 40%) dans le traitement de l'ulcère de jambe d'origine veineuse (IPS ≥ 0.8) - Avis CNEDIMTS disponible sur le site <https://www.has-sante.fr/>.

### LES 3 INDISPENSABLES

#### ✓ LA BONNE TAILLE

Pour choisir la taille du kit, mesurer la circonférence de la cheville, environ 2 cm au-dessus de la malléole.



#### ✓ LE BON ÉTIREMENT

Pour appliquer la bonne tension, bien étirer la bande et s'assurer que l'ovale devienne un cercle. La pression doit être appliquée à partir de la cheville.



Bande non étirée



Bande étirée

#### ✓ LE BON RECOUVREMENT

Pour appliquer le bon recouvrement, chaque nouvelle spirale doit recouvrir le cercle précédent.



50 % de recouvrement



2/3 de recouvrement

### LES 4 ÉTAPES CLÉS



Pied à 90°.



Commencer à la base des orteils, en effectuant 1 à 2 tours d'ancrage autour du pied avec un étirement modéré.



Prendre le talon. Commencer à appliquer la pression à partir de la cheville



Remonter jusqu'au genou en étirant la bande.

### BONUS : NOS ASTUCES

#### CAPITONNAGE



Utiliser des chutes de la bande blanche.

#### FORTE CHALEUR



Mettre les bandes UrgoK2 au réfrigérateur à 4° pendant 2h30<sup>8</sup>.

#### ESTHÉTIQUE



Mettre un bas ou une chaussette au-dessus des bandes.

### BESOIN D'AIDE OU DE CONSEIL



Retrouvez la vidéo de pose UrgoK2

**Healico**



Meilleure  
innovation  
e-santé de  
l'année 2021




**L'application tout-en-un qui vous accompagne dans la prise en charge des plaies au quotidien.**

Au lit du patient en quelques clics, suivez l'évolution des plaies, mesurez-les, communiquez avec vos collègues... et bien plus encore !



ÉVALUER  
LA PLAIE

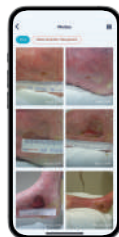

SUIVRE  
L'ÉVOLUTION



PARTAGER ET  
COMMENTER



TRAITER



## Measure

**Mesurez vos plaies en un clin d'oeil à partir d'une photo !**

Demandez vos marqueurs de calibration à votre délégué Urgo Medical, ou commander-les directement sur Healico



## Avec Healico, vous pouvez :

- Centraliser et sécuriser toutes les données de vos patients
- Justifier vos cotations AMI11 en quelques minutes seulement
- Accéder à un catalogue regroupant les produits disponibles sur le marché
- Partager les dossiers de vos patients avec toute l'équipe de soins
- Garder de la visibilité et assurer la continuité des soins
- Échanger en temps réel avec vos collègues et allier vos expertises

Healico c'est aussi l'outil du parcours de soins qui permet de faciliter la prise en charge et fluidifier la communication pluri-disciplinaire !

## Créez un compte en 2 minutes chrono !



Une adresse e-mail



La photo d'un  
justificatif d'identité  
(CNI, permis de conduire ...)



La photo de votre carte  
professionnelle  
(ou diplôme)

Healico

Rejoignez l'aventure et gagnez encore plus de temps pour vous concentrer sur ce qui est le plus important pour vous : **soigner vos patients !**



Téléchargez l'application !



Téléchargez dans  
l'App Store


DISPONIBLE SUR  
Google Play

# Protocoles



# ULCÈRES DE JAMBE VEINEUX

Pour traiter un ulcère de jambe il faut connaître son origine et son étiologie<sup>1</sup>:

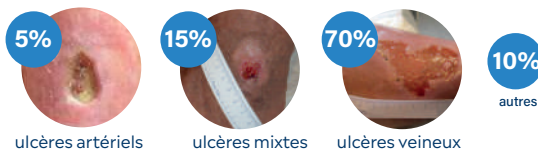

## 1<sup>ère</sup> ÉTAPE : L'EXAMEN CLINIQUE<sup>2</sup>

Si un ulcère est d'origine artérielle, la compression n'est pas recommandée. Les questions à se poser pour détecter une composante artérielle sont :

- |  |   |
|--|---|
| 1 Absence de pouls pédieux et/ou tibial postérieur                                       | <input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON |
| 2 Pied froid   | <input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON |
| 3 Douleurs de décubitus quand patient allongé  | <input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON |
| 4 Plaie creusante  | <input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON |
| 5 Douleur dans le mollet à la marche (périmètre de marche)                               | <input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON |
| 6 Temps de recoloration de la pulpe du 1 <sup>er</sup> orteil après pression >3 secondes | <input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON |
| 7 Présence de nécrose noire  | <input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON |
| 8 Plaies des orteils associées   | <input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON |

Si réponse «**OUI**» à l'une de ces questions il peut y avoir une composante artérielle. Il faut des examens complémentaires.


**(voir étape 2 : Mesure de l'IPS)**

Dans le cas d'un ulcère de jambe veineux, le traitement : compression multitypes recommandé par la HAS en 1<sup>ère</sup> intention (bandes **UrgoK2**).


## 2<sup>ème</sup> ÉTAPE : MESURE DE L'IPS

La mesure de l'IPS (Indice de Pression Systolique) est recommandée par la HAS<sup>3</sup> et permet :

- De rechercher une composante artérielle associée ou AOMI (Artériopathie Oblitérante des Membres Inférieurs)
- D'adapter la compression grâce à l'échelle ci-dessous :

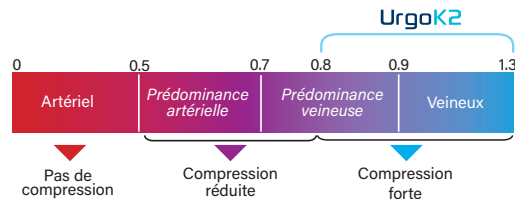

## 3<sup>ème</sup> ÉTAPE : MISE EN PLACE DU PROTOCOLE

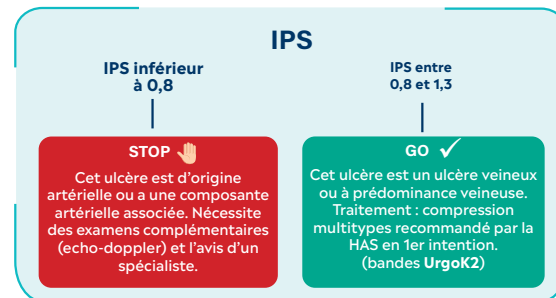

Protocoles



Peu importe l'origine de la plaie, un pansement **UrgoStart Plus (avec TLC-NOSF)** est recommandé. Si la plaie s'aggrave ou stagne depuis plus de 6 semaines, d'autres facteurs peuvent influencer l'absence de cicatrisation. Il faut alors rediriger vers un spécialiste (médecin vasculaire).

Vidéo  
mesure IPS



# PLAIES DU PIED DIABÉTIQUE

Parcours de soins primaire devant une plaie du pied diabétique<sup>1</sup>

## 1<sup>ère</sup> ÉTAPE : ÉVALUATION GÉNÉRALE

### Comorbidités à haut risque

Insuffisance cardiaque, insuffisance rénale terminale, précarité sociale et troubles psychiatriques

### Approche globale

Antécédents médicaux et sociaux, examen clinique, biologie

## 2<sup>ème</sup> ÉTAPE : ÉVALUATION DE LA PLAIE DU PIED DIABÉTIQUE


### TYPE 1 : PLAIE DU PIED DIABÉTIQUE NON COMPLIQUÉE

Questions à se poser en 1<sup>ère</sup> intention face à la plaie :

- 1 Pouls perçu ? ☐ OUI ☐ NON
- 2 Absence de signe d'infection ? ☐ OUI ☐ NON
- 3 Absence de nécrose ? ☐ OUI ☐ NON
- 4 Absence de mise à nue des os, muscles ou/et tendons ? ☐ OUI ☐ NON

Si réponse « **OUI** » à toutes ces questions, il s'agit d'une plaie du pied diabétique non compliquée, il faut suivre les étapes suivantes.  
Sinon, passer au "TYPE 2".

### PLAIE DU PIED DIABÉTIQUE NON COMPLIQUÉE

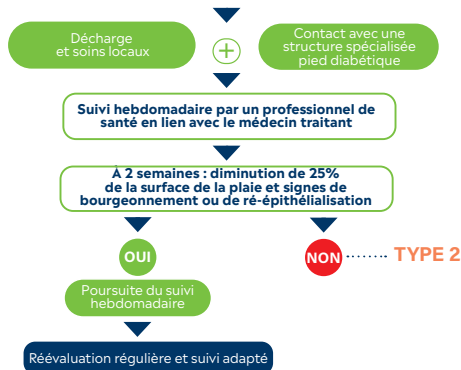


## TYPE 2 : PLAIE DU PIED DIABÉTIQUE COMPLIQUÉE

Questions à se poser en 1<sup>ère</sup> intention face à la plaie :

- 1 Nécrose sèche ? ☐ OUI ☐ NON
- 2 Mise à nue d'os, muscle et/ou tendon ? ☐ OUI ☐ NON
- 3 Pouls périphériques abolis ? ☐ OUI ☐ NON
- 4 Signes d'infections ? ☐ OUI ☐ NON
- 5 Terrain à risque ? ☐ OUI ☐ NON  
(Insuffisance cardiaque, insuffisance rénale terminale, précarité sociale, troubles psychiatriques)

## PLAIE DU PIED DIABÉTIQUE COMPLIQUÉE

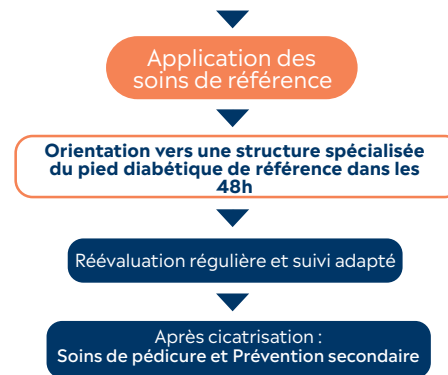

**ATTENTION SI PRÉSENCE D'ABCÈS / GANGRÈNE HUMIDE OU EXTENSIVE / FIÈVRE OU AUTRES SIGNES DE SEPSIS = PLAIE DU PIED DIABÉTIQUE EN URGENCE ABSOLUE « TYPE 3 »**

# PLAIES DU PIED DIABÉTIQUE

## TYPE 3 : PLAIE DU PIED DIABÉTIQUE EN URGENCE ABSOLUE

### Attention si présence de :

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1 Abscès,                       | <input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON |
| 2 Gangrène humide ou extensive, | <input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON |
| 3 Fièvre,                       | <input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON |
| 4 Autres signes de sepsis       | <input type="radio"/> OUI <input type="radio"/> NON |

Il s'agit d'une plaie du pied diabétique en urgence absolue.  
Il faut suivre les étapes suivantes :

### PLAIE DU PIED DIABÉTIQUE EN URGENCE ABSOLUE

Hospitalisation en urgence  
dans une unité de pied diabétique spécialisée

Après la prise en charge initiale, suivi par une  
structure spécialisée du pied diabétique

Réévaluation régulière et suivi adapté

Après cicatrisation :  
Soins de pédicure et Prévention secondaire



## 3<sup>ème</sup> ÉTAPE : SOINS DE RÉFÉRENCE

**Décharge :** la réduction de la pression plantaire extrinsèque et/ou intrinsèque est essentielle pour la protection et la cicatrisation des ulcères. L'utilisation de dispositifs inamovibles de mise en décharge à hauteur du genou, plâtres de contact total (marche), déambulateurs ou chaussures spécifiques devront être utilisés suivant les besoins individuels et les ressources disponibles.

**Rétablissement de la circulation du pied :** chez les patients atteints de maladies artérielles périphériques (pression du poignet < 50mm Hg, ABI > 0,5, pression de l'orteil < 30mmHG or TcpO2 < 25 mm Hg), la revascularisation doit être considérée. Lorsqu'un ulcère ne montre aucun signe de cicatrisation dans les 4 semaines malgré un traitement optimal ; une évaluation vasculaire et une revascularisation supplémentaire doivent être envisagées (même si les tests ci-dessus se situent dans une fourchette normale/acceptable).

**Traitement de l'infection :** lorsqu'il y a des signes cliniques d'infection, un traitement antibiotique doit être administré après avoir obtenu des échantillons microbiologiques (idéalement les tissus profonds), suivi d'ajustements en fonction des résultats microbiologiques et de la réponse clinique. Le retrait des tissus nécrosés ou non viables suivi d'une évaluation complète de la sévérité de l'infection sont requis.

**Contrôle métabolique/gestion holistique :** l'approche métabolique nécessite l'optimisation du contrôle de glycémie (avec insuline si nécessaire), le traitement de la malnutrition et de l'œdème s'il y en a. La gestion des comorbidités importantes est obligatoire.

**Traitement de la plaie en local :** une évaluation fréquente des ulcères, la détersion et le changement de pansements doivent être effectués. Le choix du pansement est basé sur les caractéristiques de l'ulcère (lit de la plaie, exsudats, taille, profondeur, douleurs). Dans le cas des ulcères neuro-ischémiques, il est recommandé d'utiliser des pansements avec de la TLC-NOSF (Technologie Lipido-colloïde avec Nano-OligoSaccharide Factor).

# ESCARRES



## 1ÈRE ÉTAPE : ENQUÊTE / OBSERVATION<sup>1</sup>

### Patient



- Antécédents/pathologies
- Traitements
- Allergies
- Mobilité/position/appui
- Hygiène de vie
- Conditions de vie (environnement, aidants)
- Dénutrition/Hydratation
- Etat financier
- Matériaux et locaux adaptés

### Plaie<sup>2</sup>



- Bilan initial de la plaie
- Stade
- Étiologie
- Echelle colorielle
- Antériorité/récidive
- Histoire de la plaie
- Douleur
- Profondeur

### En collaboration avec le médecin



- Recherche du syndrome inflammatoire
- Analyse de la dénutrition et déshydratation
- Recherche de carence

## 2ÈME ÉTAPE : PROTOCOLE

- 1 Lavage : eau + savon neutre
- 2 Sécher
- 3 Détersion mécanique en fonction du stade  
(Fibrine, nécrose) *détersion du membre inférieur sur avis médical*
- 4 Pansement adapté en fonction de la localisation<sup>(3)</sup>
- 5 Mise en place de décharge<sup>(4)</sup> et de latéralisation

## 3ÈME ÉTAPE : EVALUATION / SUIVI

- 1 fois par semaine : bilan de l'évolution de la plaie
- Suivi photos
- Mesures, profondeur, couleur, aspect des berges
- État global du patient



**Plus la cicatrisation évolue favorablement,  
plus les changements de pansement  
peuvent être espacés.**

# Poses / Découpes



## POSES

### Pieds



### Jambes



## DÉCOUPES

### Pieds



DÉCOUPE CIRCULAIRE

DÉCOUPE PAPILLON

### Orteils



DÉCOUPE INTER-ORTEILS



DÉCOUPE EN RECTANGLES FINS




DÉCOUPE EN CROIX

### Localisations difficiles

#### PLAIE CREUSE

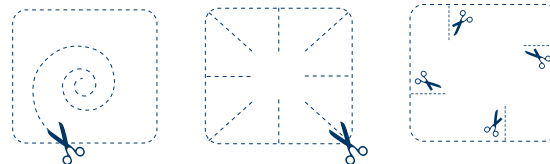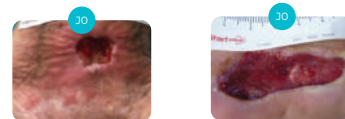

#### PLAIE À LOCALISATION DIFFICILE

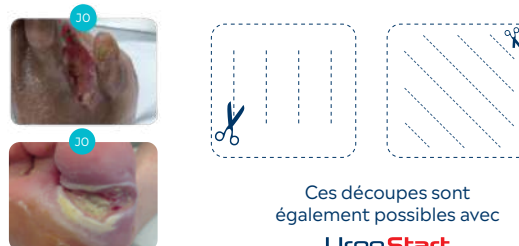

Ces découpes sont également possibles avec

**UrgoStart**  
Interface

## Talon



## Malléole



## Pied



## Orteils



## Mains



## Pieds




## Genoux



## Coudes



## Mains

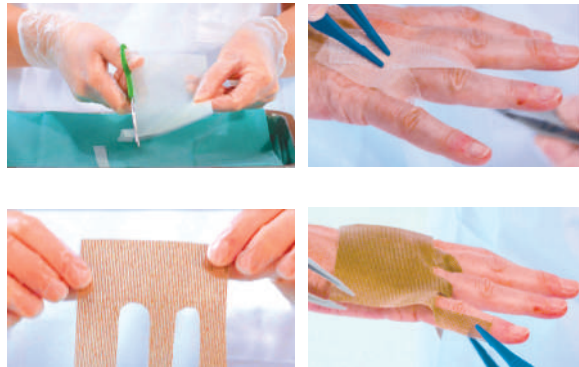

## Coude



## Pieds





## Ordonnance type « Comment prescrire ? »



Coordonnées prescripteur  
avec N° d'identification  
professionnel

Coordonnées Patient (nom,  
prénom)

Date : ...../...../.....

- URGOSTART PLUS BORDER - taille 8x8  
Durée totale de la prescription : X mois  
Quantité : XX boîtes  
Durée : 1 mois, renouvelable 3 fois.

- URGOTUL - taille 15x20

- URGOK2  
Taille de cheville : 18-25 cm  
Largeur de bandes : 10 cm

1 boîte à chaque changement de pansement.  
Quantité : 15 boîtes\*  
Durée : 1 mois  
Renouvelable 3 fois

*Non substituable*

Cette illustration est donnée à titre d'exemple

Bien écrire  
**URGOSTART PLUS BORDER**  
en toutes lettres

Bien écrire  
**URGOTUL**  
en toutes lettres

Préciser la mention  
**NON SUBSTITUABLE<sup>1</sup>**

\* Si renouvellement des soins infirmiers (changement de bandes) tous les 2 jours.

# Assortiments

**100% REMBOURSABLES<sup>2</sup>**  
**NON SUBSTITUABLES<sup>1</sup>**

**UrgoStart<sup>plus</sup>**  
Border



Taille	Boîte	Code Hospitalier	Code ville
8 x 8 cm	16	552719	35468.900.399.7.5
10 x 12 cm	16	603025	35468.900.425.6.2
13 x 15 cm	16	603014	35468.900.425.2.4
17 x 20 cm	16	603016	35468.900.425.5.5
20 x 20 cm	16	602891	35468.900.419.4.7

**UrgoStart<sup>plus</sup>**  
Absorb



**Une gamme complète**  
**SEPTEMBRE 2025**

Taille	Boîte	Code Hospitalier	Code ville
6 x 6 cm	16	604185	35468.900.472.0.8
10 x 10 cm	16	604190	35468.900.472.1.5
13 x 12 cm	16	604193	35468.900.472.2.2
15 x 20 cm	16	754305	35468.900.413.4.3

**UrgoStart<sup>plus</sup>**  
Compresse



Taille	Boîte	Code Hospitalier	Code ville
6 x 6 cm	16	754183	35468.900.401.9.3
13 x 12 cm	16	754193	35468.900.402.8.5
15 x 20 cm	16	754202	35468.900.402.6.1

**100% REMBOURSABLES<sup>2</sup>**  
**NON SUBSTITUABLES<sup>1</sup>**



**UrgoTul**



Taille	Boîte	Code Hospitalier	Code ville
5 x 5 cm	10	508537	NC
10 x 10 cm	10	508538	NC
10 x 12 cm	16	NC	34010.971.728.3.5
15 x 20 cm	10	508512	34010.755.472.4.2
10 x 40 cm	10	508541	34010.776.095.5.9
20 x 30 cm	5	551910	NC

**Urgo**

**Fil**



**NOUVEAUTÉ**  
**Disponible à partir de janvier 2026**

Taille	Boîte	Code Hospitalier	Code ville
5 x 5 cm	10	603710	NC
12 x 12 cm	16	602662	35468.900.408.3.4
12 x 40 cm	10	602663	35468.900.408.5.8
15x 22 cm	10	602664	35468.900.408.7.2

**UrgoStart**  
Interface



Taille	Boîte	Code Hospitalier	Code ville
5 x 7 cm	16	754124	35468.900.326.6.2
13 x 12 cm	16	754150	35468.900.385.7.2
15 x 20 cm	16	754160	35468.900.385.6.5



**100% REMBOURSABLES<sup>2</sup>**  
**NON SUBSTITUABLES<sup>1</sup>**

**UrgoClean\***  
Meche



Taille	Boîte	Code Hospitalier	Code ville
5 x 40 cm	16	506437	34010.413.696.6.3
2.5 x 40 cm	5	603210	NC

**UrgoTul Ag**



Taille	Boîte	Code Hospitalier	Code ville
10 x 12 cm	16	507634	34010.958.438.5.0
15 x 20 cm	16	507628	34010.958.437.9.9

**UrgoClean Ag**



Taille	Boîte	Code Hospitalier	Code ville
6 x 10 cm	16	552253	35468.900.000.0.5
13 x 12 cm	16	552254	35468.900.000.2.9
15 x 20 cm	16	552255	35468.900.000.1.2

\* **UrgoClean** n'est pas disponible dans les DOM TOM

**100% REMBOURSABLES<sup>2</sup>**  
**NON SUBSTITUABLES<sup>1</sup>**



**UrgoK2**



Taille de cheville	Largeur de bandes	Code Hospitalier	Code Ville
18-25 cm	8 cm	604195	35468.900.377.6.6
18-25 cm	10 cm	604196	35468.900.472.4.6
18-25 cm	12 cm	552921	34010.206.445.8.3
25-32 cm	8 cm	604198	35468.900.377.7.3
25-32 cm	10 cm	604199	35468.900.378.0.3
25-32 cm	12 cm	604200	35468.900.377.9.7

**UrgoK2**

Latex free



Taille de cheville	Largeur de bandes	Code Hospitalier	Code Ville
18-25 cm	10 cm	604192	35468.900.294.9.5
25-32 cm	10 cm	604194	35468.900.294.8.8

Pour les DROM-COM, seul **URGOK2 Latex Free** est disponible.

\*Hors UrgoK2 Latexfree

## Mentions légales

### UrgoTul

Pansement interface souple avec matrice TLC. Dispositif Médical de classe IIb (BSI CE 2797). Intégralement remboursable LPPR (Séc. Soc. 60 % + Mutuelle 40 %) dans le traitement des plaies aiguës, chroniques et d'épidermolyse bulleuse congénitale.

Avis de la Haute Autorité de Santé, disponible sur le site <https://www.has-sante.fr>.

Contre-indications : plaies de muqueuses, hypersensibilité connue du patient à l'un des pansements avec matrice TLC, ou à la carboxyméthylcellulose (CMC). La fréquence de renouvellement est laissée à l'appréciation du professionnel de santé. Cependant, il est recommandé de renouveler UrgoTul tous les 1 à 4 jours et d'adapter la fréquence de renouvellement selon l'état clinique de la plaie et la quantité des exsudats (c'est-à-dire la quantité des fluides au niveau de la plaie) sans dépasser 7 jours d'application par pansement. Renouvellement tous les 1 à 3 jours pour l'épidermolyse bulleuse.

Lire attentivement la notice avant utilisation.

### UrgoClean Ag

Pansement antimicrobien avec fibres poly-absorbantes et matrice TLC-Ag. Dispositif Médical de classe III (BSI CE 2797). Indications : Plaies exsudatives chroniques et aiguës à risque ou avec signes d'infection locale.

Contre-indications : Plaies de muqueuses; Hypersensibilité connue à l'argent, à la carboxyméthylcellulose (CMC), ou à l'un des pansements avec matrice TLC ou TLC-Ag; Ne pas utiliser le pansement chez des patients devant passer un examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM).

Renouvellement tous les 1 à 2 jours puis espacement possible. Lire attentivement la notice avant utilisation.

Intégralement remboursable LPPR (Séc. Soc. 60% + Mutuelle 40%) dans le traitement séquentiel de 4 semaines des ulcères de jambe à caractère inflammatoire ayant au moins 3 des 5 signes cliniques suivants : Douleur entre deux changements de pansements, érythème péri-lésionnel, oedème, plaie malodorante, exsudat abondant. Classe LPPR des « Pansements à l'Argent ». Avis de la Haute Autorité de Santé consultables sur le site <https://www.has-sante.fr/>.

### UrgoTul Ag

Pansement interface souple avec matrice TLC-Ag. Dispositif Médical de classe III (BSI CE 2797).

Indications : Plaies aiguës et chroniques à risque ou avec signes d'infection locale.

Contre-indications : Plaies de muqueuses; Hypersensibilité connue à l'argent, à la carboxyméthylcellulose (CMC), ou à l'un des pansements avec matrice TLC ou TLC-Ag; Ne pas utiliser le pansement chez des patients devant passer un examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM). Renouvellement tous les 1 à 3 jours.

Lire attentivement la notice du produit avant utilisation.

Intégralement remboursable LPPR (Séc. Soc. 60% + Mutuelle 40%) dans le traitement séquentiel de 4 semaines des ulcères de jambe à caractère inflammatoire, ayant au moins 3 des 5 signes cliniques suivants : douleur entre deux changements de pansement, érythème péri-lésionnel, oedème, plaie malodorante, exsudat abondant. Classe LPPR des « Pansements à l'Argent ». Avis de la Haute Autorité de Santé consultables sur le site <https://www.has-sante.fr/>.

### UrgoStart Plus Border / UrgoStart Plus Compresse / UrgoStart Plus Absorb

Traitement pour réduire le temps de cicatrisation.

Dispositifs Médicaux de classe IIb, (BSI CE 2797).

Indications : Ulcères de jambe, plaies du pied diabétique, escarres, autres plaies à risque de cicatrisation de longue durée, plaies récurrentes, ou plaies à risque de retard de cicatrisation.

Contre-indications : plaies cancéreuses, fistuleuses, nécrotiques, hémorragiques, plaies sur muqueuses, hypersensibilité connue à l'un des pansements avec matrice TLC ou TLC-NOSF, ou à la carboxyméthylcellulose (CMC). Renouvellement tous les 1 à 2 jours pendant la phase de détersion de la plaie, puis adapter la fréquence de renouvellement en fonction du volume des exsudats et de l'état clinique de la plaie. Intégralement remboursable LPPR (Séc. Soc. : 60% + Mutuelle : 40%) dans le traitement de l'ulcère de jambe veineux ou mixte à prédominance veineuse, en phase de bourgeonnement (traitement séquentiel), et dans l'ulcère du pied chez le patient diabétique d'origine neuro-ischémique (ischémie non critique), non infecté (critères d'infection IDSA/IWGDF), en phase de bourgeonnement (traitement séquentiel). Lire attentivement la notice avant utilisation. Avis de la Haute Autorité de Santé consultables sur le site <https://www.has-sante.fr/>.

### UrgoClean Meche

Mèche absorbante à base de fibres poly-absorbantes et stylet d'application. Dispositif médical de classe IIb (G-Med 0459 ou BSI CE 2797).

Indications : Traitement des plaies cavitaires exsudatives et autres plaies creuses exsudatives qui ont besoin d'être comblées avec une mèche absorbante.

Contre-Indications : Fistules, sinus ou plaies tunnelisées plus étroit(e)s que le diamètre du stylet d'application. Plaies de profondeur indéterminée où dans lesquelles une solution d'irrigation ne peut être récupérée. Plaies hémorragiques. Le pansement ne doit pas être utilisé comme éponge chirurgicale. Plaies chirurgicales destinées à être fermées en première intention. Hypersensibilité connue du patient à ce pansement.

Renouvellement tous les 1 à 2 jours. Lire attentivement la notice avant utilisation. Intégralement remboursable (Séc. Soc. 60% + Mutuelle 40%) dans la prise en charge des plaies chroniques très exsudatives en phase de détersion.

### UrgoStart Interface

Pansement interface lipido-colloïde souple.

Traitement pour réduire le temps de cicatrisation. Dispositif Médical de classe IIb (BSI CE 2797).

Indications : Ulcères de jambe, plaies du pied diabétique, escarres, autres plaies à risque de cicatrisation de longue durée, plaies récurrentes, ou plaies à risque de retard de cicatrisation. Convient pour le recouvrement des plaies anfractueuses ou de localisations difficiles, ainsi que pour les peaux péri-lésionnelles fragilisées, ou de localisations difficiles et méchage des plaies creuses. Peau péri-lésionnelle fragilisée.

Contre-indications : plaies cancéreuses, fistuleuses, nécrotiques, hémorragiques, plaies sur muqueuses, hypersensibilité connue à l'un des pansements avec matrice TLC ou TLC-NOSF, ou à la carboxyméthylcellulose (CMC). Renouvellement tous les 2 à 4 jours.

Intégralement remboursable LPPR (Séc. Soc. 60% + Mutuelle 40%) dans le traitement de l'ulcère de jambe veineux ou mixte à prédominance veineuse, en phase de bourgeonnement (traitement séquentiel), et dans l'ulcère du pied chez le patient diabétique d'origine neuro-ischémique (ischémie non critique), non infecté (critères d'infection IDSA/IWGDF), en phase de bourgeonnement (traitement séquentiel). Lire attentivement la notice du produit avant utilisation. Avis de la Haute Autorité de Santé consultables sur le site <https://www.has-sante.fr/>.

### UrgoK2 / UrgoK2 Latex free

Systèmes de compression multitypes bi-bande à pression contrôlée.

Dispositifs Médicaux de classe I. Marqués CE

Indications : Traitement, chez l'adulte, de l'ulcère veineux de jambe et/ou des oedèmes du membre inférieur, pour lequel une compression forte est recommandée.

Contre-Indications :

- Pathologie artérielle modérée ou sévère, avec notamment un Indice de Pression Systolique (IPS) récent <0.8.
- Patient souffrant de phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle), de phlébite septique.
- Oedème causé par une insuffisance cardiaque congestive.
- Pontage artériel extra-anatomique.
- Hypersensibilité connue à l'un des constituants - en particulier le latex pour URGO K2.

Lire attentivement la notice des produits avant utilisation. Intégralement remboursables LPPR (Séc. Soc. 60% + Mutuelle 40%) dans le traitement de l'ulcère de jambe d'origine veineuse (IPS  $\geq$  0.8) - Avis CNEDIMTS disponible sur le site <https://www.has-sante.fr/>.

### UrgoFit

Pansement interface souple et conforme composé d'une matrice TLC. Dispositif Médical de classe IIb (BSI CE 2797). Intégralement remboursable LPPR (Séc. Soc. 60 % + Mutuelle 40 %) dans le traitement des plaies aiguës, chroniques et d'épidermolyse bulleuse congénitale.

Avis de la Haute Autorité de Santé, disponible sur le site <https://www.has-sante.fr>.

Contre-indications : plaies de muqueuses, hypersensibilité connue du patient à l'un des pansements avec matrice TLC, ou à la carboxyméthylcellulose (CMC).

Lire attentivement la notice avant utilisation.

## Références

(1) Lorsque prescrit en nom de marque, sauf accord exprès et préalable du prescripteur ou urgence et intérêt du patient le justifiant.

### NOS SOLUTIONS

- (2) Mûnter KC, Meaume S, Augustin M, Senet P, Kérihuel J.C. The reality of routine practice: a pooled data analysis onchronic wounds treated with TLC-NOSF wound dressings. J Wound Care. 2017 Feb; 26 (Sup2): S4-S15. Erratum in: J Wound Care. 2017 Mar 2; 26(3): 153.
- (3) Meaume S, Domp Martin A, Lazareth I, Sigal M, Truchetet F, Sauvadet A, Bohbot S. Quality of life in patients with leg ulcers: results from CHALLENGE, a double-blind randomised controlled trial. Journal of Wound Care. 2017; 26 (7): 368-379.
- (4) Meaume S, Senet P, Thomé B, Aragno VA, Serge B, Fortin S, Boucley I, Michon-Pasturel U, Colboc H. Impact of primary dressings on healing of venous leg ulcers: a French cohort study from the healthcare insurance database. J Wound Care. 2024 Sep 2;33(9):678-686. doi: 10.12968/jowc.2024.0189. PMID: 39287032.
- (5) Maunoury F, Oury A, Fortin S, Thomassin L, Bohbot S. Cost-effectiveness of TLC-NOSF dressings versus neutral dressings for the treatment of diabetic foot ulcers in France. PloS one. 2021 Jan 22; 16(1): e0245652.

### DES TECHNOLOGIES INNOVANTES

- (1) Mûnter KC, Meaume S, Augustin M, Senet P, Kérihuel J.C. The reality of routine practice: a pooled data analysis on chronic wounds treated with TLC-NOSF wound dressings. J Wound Care. 2017 Feb; 26 (Sup2): S4-S15. Erratum in: J Wound Care. 2017 Mar 2; 26(3): 153
- (2) Sigal ML, Addala A, Maillard H, Chahim M, Sala F, Blaise S, Dalac S, Meaume S, Bohbot S, Tumba C, Tacca O. Clinical evaluation of a new TLC-NOSF dressing with poly-absorbent fibers for the local management of exuding leg ulcers, at the different stages of the healing process: Results from two multicentric, single-arm, prospective, open-label clinical trials. J Wound Care 2019; 28(3):164-175
- (3) Meaume S. et al. Evaluation of two fibrous wound dressings for the management of leg ulcers: results of a European randomised controlled trial (EARTH RCT). J Wound Care (2014) 23(3):105-6;108-114-6. Etude menée avec le pansement UrgoClean compressé.
- (4) Données in vitro. Laboratoires Urgo.

### UrgoFit

- (1) In vitro data. Internal report N°RS/UR/2019-458/QUP, Laboratoires Urgo, 2025. In vitro data. Internal report RE/UR/2020-029/QUP, Laboratoires Urgo, 2023.
- (2) Internal report of clinical Trial N°F-18-06-AWC019, Study HEAL.

### UrgoTul

- (1) V. Voichet, Pertes de substance en chirurgie pédiatrique : intérêt et efficacité du pansement UrgoTul en cicatrisation dirigée. Poster, CPC 2021
- (2) F.A. Allaert, Cas cliniques de l'utilisation et de la performance clinique d'UrgoTul Border dans la cicatrisation des plaies chirurgicales (Protect). Poster, CPC 2015
- (3) J. Perez et al., Observation of the new lipido-colloid contact layer in the local management of acute and chronic wounds. Poster, EWMA 2009
- (4) E. Bourdon-Lanoy, I. Corset et al., Observation of the new lipido-colloid contact layer in the local treatment of hereditary epidermolysis bullosa lesions. Poster, CPC 2010.
- (5) Meaume S, Perez J, Descamps H, Voichet P, Jault P, Saunier V, Bohbot S. (2011). Use of a new, flexible lipido-colloid dressing on acute and chronic wounds: results of a clinical study. J Wound Care. 2011 Apr;20(4):180, 182-5.
- (6) Meaume S. et al., The importance of pain reduction through dressing selection in routine wound management: the MAPF study. Journal of Wound Care. 2004, Vol 13, No 10, 409-413 (étude menée avec UrgoTul): Parmi 5 850 patients, réduction de la douleur lors des changements de pansements chez 95 % des patients souffrant de plaies aiguës et chez 88 % des patients souffrant de plaies chroniques.

### UrgoStart Plus Border / UrgoStart Plus Compressé / UrgoStart Plus Absorb

- (2) Base de données SNDS. Données de remboursement ville de l'Assurance Maladie. 2024

### UrgoClean

- (2) Meaume S, Dissemmond J, Addala A et al. Evaluation of two fibrous wound dressings for the management of leg ulcers: results of a European randomised controlled trial (EARTH RCT). J. Wound Care 2014. 23 (3): 105-116. Critère principal: réduction relative de surface S6 : UrgoClean 34.10% (n=80) vs Aqualac 34.40% (n=74) NS.
- (3) Meaume S. et al, Management of chronic wounds with an innovative absorbent wound dressing. J. Wound Care, Vol 21, No 7; July 2012, 315-322.
- (4) Données internes Urgo (étude in vitro), rapport n°95576-2010, n°141263-2012.
- (5) Données internes Urgo, rapport n°88050-2009.

### UrgoTul Ag, UrgoClean Ag

- (1) Études in vitro - Laboratoires Urgo.
- (2) N. Desroche et al. Evaluation of in-vitro anti-biofilm activities of two dressings with poly-absorbent dressing and a DACC-coated dressing. Poster EWMA 2017.
- (3) Dalac S., et al., Clinical evaluation of a dressing with poly absorbent fibres and a silver matrix for managing chronic wounds at risk of infection: a non-comparative trial. J Wound Care, Vol 25, No 9, September 2016.

### UrgoK2

- (1) Prise en charge de l'ulcère de jambe à prédominance veineuse hors pansement. Juin 2006. Document de la Haute Autorité de Santé, disponible sur le site [www.has-sante.fr](http://www.has-sante.fr)
- (2) Bon usage des technologies de santé. La compression médicale dans les affections veineuses chroniques. HAS décembre 2010. Document de la Haute Autorité de Santé, disponible sur le site [www.has-sante.fr](http://www.has-sante.fr).
- (3) Jünger M, Ladwig A, Bohbot S, et al. Comparison of interface pressures of three compression bandaging systems used on healthy volunteers. J Wound Care. 2009;18(11):474, 476-80.
- (4) European Wound Management Association (EWMA). Management of Patients With Venous Leg Ulcers: Challenges and Current Best Practice (multicomponent system). J Wound Care. 2016 Jun; 25 Suppl 6:S1- S67.
- (5) S. Meaume et al. Aetiological treatment of venous leg ulcers with compression therapy: real-life outcomes with two different procedures. J Wound Care VOL 32, NO 10, October 2023.
- (6) Benigni JP, Lazareth I, Parpex P, et al. Efficacy, safety and acceptability of a new two-layer bandage system for venous leg ulcers. J Wound Care. 2007;16(9):385-90.
- (7) Hanna R, Bohbot S, Connolly N. A comparison of interface pressures of three compression bandage systems. Br J Nurs. 2008;17(20):S16-24.
- (8) Les systèmes de compression multitype Urgo K2 et Urgo K2 Latex free maintiennent leurs propriétés après passage au froid à 4°C. HC-2018/298-01-MAR.

### PROTOCOLES

#### Ulcers de jambe veineux

- (1) Gohel, M., and Poskitt, K. (2019). Chronic ulceration of the leg. Surgery - Oxford International Edition 37, 88-92.
- (2) Questionnaire de 8 questions développé par le Dr Léger, Médecin vasculaire à la clinique Pasteur de Toulouse.
- (3) Prise en charge de l'ulcère de jambe à prédominance veineuse hors pansement. Juin 2006. Document de la Haute Autorité de Santé, disponible sur le site [www.has-sante.fr](http://www.has-sante.fr)

#### Plaies du pied diabétique

- (1) Meloni M, Izzo V, Manu C et al (2019) Fast-track pathway: an easy-to-use tool to reduce delayed referral and amputations in diabetic patients with foot ulceration. The Diabetic Foot Journal 22(2): 38-47.

#### Escarres

- (1) 2012 - Recommandations - Prévention et traitement des escarres - Maladies à risque et/ou porteurs d'escarres. Accessible sur 2012-recommandations-pour-la-prévention-et-le-traitement-des-escarres-PERSE.pdf.
- (2) Recommandation de bonne pratique (HAS) - Mis en ligne le 01 nov. 2001 - Mis à jour le 19 juil. 2006. Prévention et traitement des escarres de l'adulte et du sujet âgé.
- (3) Recommandations de la SFE, janvier 2024. Bonne utilisation des pansements : choix selon l'évaluation de la plaie. Accessible sur <https://www.sf-escarre.com/wp-content/medias/2024/04/VF-Liste-pst-et-choix.pdf>.
- (4) Journées cicatrisation Paris - 2020 - Recommandations de bonnes pratiques pour le positionnement des sujets à risque et/ou porteurs d'escarres.

Nous remercions les infirmières, infirmières et IPA pour leur soutien dans la construction de ce guide.

MARECAL Aurélie - IDE  
DESTRUN Catherine - IDE  
BLANCHARD Sophie - IPA  
SAINT RUFF Francine - IDE  
LEGEAY Franck - IDE  
NAVARRO Anthony - IDE  
BLARD Gaetan - IDE

# Pourquoi choisir Urgo Médical ?



**L'INNOVATION AU SERVICE DES  
PATIENTS ET DE LA COLLECTIVITE**

Votre délégué  
Urgo Medical



[www.urgomedical.fr](http://www.urgomedical.fr)



Urgo Medical France



@UrgoMedicalFrance

Fabricant : Laboratoires URGO - 09/2025 - PF : 803554